

老人服務事業管理系













專業教室設備表單

設備基本資料	
設備中文名稱	血壓監視系統
設備英文名稱	Blood pressure supervisory system
使用課程	老人生理學、老人照顧概論、老人照顧實務與運用、老人健康促進

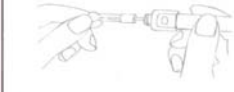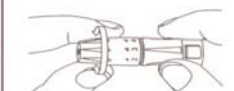

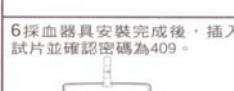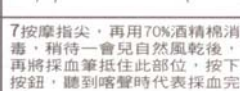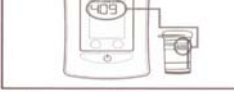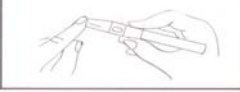


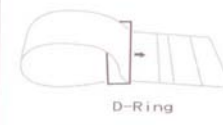
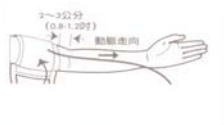





使用說明


測量血糖：

測量血糖		測量血糖	
<p>1 洗手，用溫肥皂水清洗雙手並拭乾。</p>	<p>2 安裝採血器具，取下採血筆蓋，套入採血針，確定緊固。</p>	<p>3 取下採血針的護蓋，而後將採血筆蓋套回。</p>	<p>8 輕輕擠壓穿刺的周邊部位以取得足夠的血量。注意不要讓血滴散開。</p>
			
<p>4 選擇採血深度。</p>	<p>5 將拉桿往後拉，聽到喀聲時代表已經安裝妥當，請將採血筆置於一旁備用。</p>	<p>6 採血器具安裝完成後，插入試片並確認密碼為409。</p>	<p>9 在有“*”閃爍時，將試片上的吸入口靠近血滴使其自動導入，確認反應區內完全被血液充滿後，再將試片移開。</p>
			
<p>7 按摩指尖，再用70%酒精棉消毒，稍待一會兒自然風乾後，再將採血筆抵住此部位，按下按鈕，聽到喀聲時代表採血完成。</p>	<p>10 機器會發出“嗶”聲，開始進行反應並倒數計時。結果會出現於螢幕，並自動被記憶。</p>	<p>11 將試片取下，機器將會自動關機。</p>	<p>12 丟棄採血針與試片。丟棄採血針時，請將針頭刺入採血針頭護蓋後再行丟棄，避免刺傷他人。</p>
			

測量血壓：

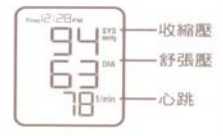測量血壓		測量血壓	
<p>1 放鬆並坐下休息至少10分鐘。</p> 	<p>2 將臂帶上的接頭接上機器側面的接孔。</p> 	<p>5 臂帶配戴好後，將左手臂放置在桌上，讓臂帶與心臟同高，保持手臂放鬆狀態，然後按下  鍵啟動。</p> 	<p>6 機器會發出“嗶”一聲，所有液晶螢幕符號亮起，此時主機進入自我檢視。約3秒後會自動開始加壓。</p> 
<p>3 整理臂帶，平滑布面在臂帶內側且保持D-Ring金屬環不要接觸到皮膚。左手肘放置在桌上，手心向上，將臂帶套上左上手臂。</p>  <p>D-Ring</p>	<p>4 調整臂帶下緣和手肘的距離大約為2到3公分，管線與血管平行。拉緊臂帶並繫牢，請注意不要過於壓迫手臂，手臂與臂帶間保留約1根手指的空隙。</p>  <p>2~3公分 (0.8~1.2吋) 鬆緊度 鬆緊度</p>	<p>7 當達到適當的壓力點，機器會發出“嗶嗶”聲，緊接著臂帶開始慢慢放氣，進行量測，量測時機器會發出“嗶”聲並伴隨著閃爍的 。</p> 	<p>8 量測完成後，機器發出“嗶嗶”聲，並顯示收縮壓、舒張壓及心跳值。</p>  <p>收縮壓 舒張壓 心跳</p>

請注意：

- 當臂帶完全放氣後，若再次充氣，代表機器正在尋找適合的壓力點，此為正常現象，請放心。
- 若您想再測一次，請休息5-10分鐘後再進行。
- 欲關機請按  鍵，或閒置3分鐘後機器將自動關機。