

# 老人服務事業管理系

## 專業教室設備表單

設備基本資料	
設備中文名稱	步行輔助器
設備英文名稱	Arm rest walkerette
使用課程	老人健康促進
	
使用說明	
<p>一、操作說明</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 先將助行器豎立於地面</li><li>2. 展開腳架<ol style="list-style-type: none"><li>a. 單手握持兩扶手中間之翻轉固定鈕(1)附近管身，並向上提起。</li><li>b. 同時，以另隻手握持腳架伸展固定鈕(2)，並向下推，有如撐開雨傘，將腳架撐開至少 64 公分以上之安全寬度，再旋緊該腳架伸展固定鈕(2)。</li></ol></li><li>3. 安置扶手架<ol style="list-style-type: none"><li>a. 向上翻轉扶手架約 270°至水平狀態，同時理順剎車線，再旋緊扶手翻轉固定鈕(1)。</li><li>b. 調整兩扶手架之間距：旋鬆兩扶手架下端之角度固定鈕(4)，向下鬆開約 0.6 公分後，即可調整左、右兩扶手，使其靠近腰部，再旋緊該角度固定鈕(4)。</li><li>c. 調整扶手架高度：旋鬆高度調整鈕(5)，同時向外拔到底，即可調整扶手架至適合之高度，並將高度調整鈕前端之插梢(5-1)，插進一適合高度之定位孔內，再旋緊高度調整鈕(5)增大腳架張開角度，亦可增高扶手高度。</li></ol></li></ol>	

#### 4. 使用方法

- a. 行走時，雙手握持握把(3)，左、右下臂分別平放於左、右扶手架軟墊上，左、右上臂須垂直於地面，以雙肘為支點，支撐身體行走。
- b. 減速或停止時，雙手同時平均出力，抓緊剎車手柄即可。
- c. 停放時，須撥動剎車手柄上方之防滑動卡鎖。

#### 5. 收合時之順序

- a. 鬆開扶手翻轉固定鈕(1)，翻轉扶手架至收納狀態，同時理順剎車線，並旋緊固定鈕(1)。
- b. 旋鬆高度固定鈕(5)，同時向外拔到底，將扶手架調至最低，並旋緊高度固定鈕(5)。
- c. 單手握持置於兩扶手中間之翻轉固定鈕(1)附近管身，同時以另隻手將腳架伸展固定鈕(2)向上拉，如收傘般將腳架收合，再旋緊該腳架伸展固定鈕(2)。

#### 二、注意事項

1. 收合助行器時，切勿將手置於腳架收合處，以防夾手
2. 使用時，扶手架角度固定鈕(4)必須旋緊，否則鬆脫，有發生扶手架脫落之危險
3. 腳架張開之幅度有安全使用範圍，相鄰兩腳輪之間距，最小不得低於 64 公分，否則有傾倒之危險
4. 當腳架全開後，將兩後剎車輪置於平行位置，並旋緊車輪上方之固定螺帽
5. 無法控制身體平衡者、身體虛弱者以及有向後仰倒或下滑墜地之虞者，應使用安全帶防護
6. 使用安全帶，須先調整長度，使適合於使用者之體型
7. 請注意 本助行器之剎車裝置，僅適合平地使用，如使用於較大斜坡，效果不彰

